

FINALIDADE

Utilizado em drenagem e coleta de fluidos corpóreos, em caso de hemotórax, pneumotórax, hidrotórax (pleural) e em cirurgia cardiovascular (mediastinal).

APRESENTAÇÃO

Graduação
500 ml
1.000 ml
2.000 ml

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO**

- ✓ Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno;
- ✓ Frasco/ Extensão/ Alça de sustentação: Fabricados em cloreto de Polivinila (PVC) atóxico;
- ✓ Tampa/ Conector: Fabricado em polietileno atóxico, possui a opção de conector de 1/4 ou 3/8;
- ✓ Pinça para estrangulamento/ Espiral: Fabricado em cloreto de Polivinila (PVC) atóxico;

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Abrir a embalagem assepticamente após a verificação da sua integridade e prazo de validade, antes da utilização do produto;
- ✓ Preparar o frasco coletor, adicionando um volume de água estéril suficiente para imergir a extremidade inferior do tubo interno tampando o mesmo;
- ✓ Posiciona-lo aproximadamente 70 cm abaixo do paciente com auxílio do cordão;
- ✓ Introduzir o Dreno no paciente, através de punção transcutânea ou de processo cirúrgico convencional;
- ✓ Fazer corte reto na extremidade do Dreno e posiciona-lo no conector do tubo coletor;
- ✓ Abrir a pinça do tubo e permitir drenagem gravitacional ou por sucção, conforme critério médico;
- ✓ Fechar a pinça do tubo anteriormente a sua troca ou remoção de fluidos;
- ✓ Abrir novamente após repetir a etapa de nº 1.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS/CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ Artigo Médico Hospitalar de uso único;
- ✓ Proibido reprocessar;
- ✓ Isento de látex;
- ✓ Destruir após uso;
- ✓ Descartar em local para materiais potencialmente contaminados;
- ✓ O produto só pode ser instalado por profissional habilitado;
- ✓ Nunca elevar o frasco ao nível do tórax ou da saída do dreno, utilizar o cordão para locomoção do paciente;
- ✓ Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido;
- ✓ Não se tem relatos de nenhuma queixa técnica ou reclamação causada pelo uso do produto, quando utilizados de acordo com as instruções de uso e para a finalidade a que se destina;
- ✓ Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

ARMAZENAMENTO

- ✓ Armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação.

TRANSPORTE

- ✓ Transportar e, local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM/SP3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.